



Update Software GeNose Ai Dashboard Versi 1.3.2 +build 5

Before

After

Prosedur Penggantian HEPA Filter




HEPA wajib diganti ketika
100 kali sampel negatif
atau 1 kali sampel positif

HEPA wajib dibuang setelah
1 kali sampel positif

Prosedur Penggantian HEPA Filter

HEPA wajib diganti setelah 100 kali dengan
hasil sampel positif ataupun negatif

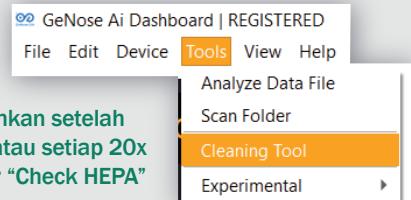

HEPA wajib dibersihkan setelah
1 kali hasil positif atau setiap 20x
analisis dalam fitur "Check HEPA"

Prosedur Pembersihan HEPA Filter

Tata cara pembersihan setelah penggantian HEPA filter:
Klik Menu "Tools" >> Sub Menu "Cleaning Tool" >>
Klik Tombol "Analyze" tanpa sampel

Prosedur pembersihan HEPA ketika hasil pasien positif




Prosedur Pembersihan HEPA Filter

Tata Cara Pembersihan setelah penggantian HEPA Filter:
Klik Menu "Tools" >> Sub Menu "Cleaning tool"


Cleaning Tool dilengkapi dengan fitur otomatis deteksi
status HEPA hingga mencapai kondisi "GOOD"

Prosedur pembersihan ketika hasil pasien positif

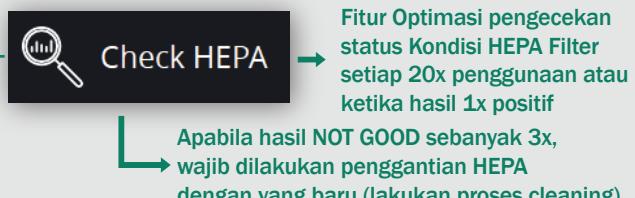

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Fitur Print tersedia dalam Menu "File"
>> Sub menu "Open Last Report"

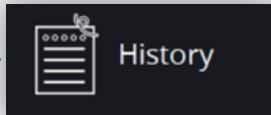


History

Fitur History berfungsi untuk
melihat data-data sebelumnya

Fitur History dihapus dari tampilan depan
pada Software versi 1.3.2+build.5


Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Fitur Print tersedia pada
tombol halaman depan
software

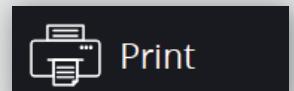

Print

Fitur Print menggantikan fitur History pada tampilan depan
software GeNose Ai Dashboard

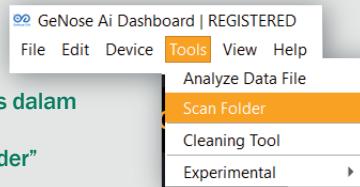



Update Software GeNose Ai Dashboard Versi 1.3.2 +build 5

Before

After

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Tidak ada notifikasi bar terkait status flushing



Tampilan depan software GeNose Ai Dashboard versi 1.2.8
(tidak disertai fitur "Status Flushing")

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Template Laporan Pembacaan Hasil Pasien

Terletak pada Menu "File" >>
Sub Menu "Restore Report Template", &
Sub Menu "Backup Report Template"

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Tidak terdapat fitur penambahan logo instansi

Fitur Pengajuan Llisensi Software

Formulir pengajuan diunduh melalui link
<https://nanosense-id.com/share/formulirgenosec19>

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Penambahan Fitur Status Flushing (Pojok Kanan Bawah)



Zona Aman → Nilai reference <2500 mV



Zona Siaga → Nilai reference 2500 - 2700 mV



Zona Waspada → Nilai reference 2700 - 3000 mV



Zona Awas → Nilai reference >3000 mV

*Kondisi Zona Waspada & Zona Awas tidak dapat melakukan proses "Analyze"

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Optimasi pengaturan Template Laporan Hasil Pasien

Berpindah dari Menu "File" ke Menu "Edit"

Menu "Edit" >> Sub menu "Edit Report":


- Edit Report Template
- Restore Report Template
- Backup Report Template.

Fitur Software GeNose Ai Dashboard

Opsi penambahan Logo Instansi

Pilih Menu "Edit" >> Sub Menu "Edit Header":

- Remove Header
- Load Header

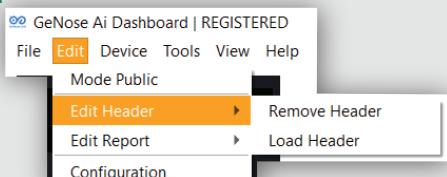

Format upload data
logo instansi pada
header software

Otomatisasi pengunduhan form pengajuan lisensi melalui
Menu "Edit" >> Sub Menu "Get ID Laptop"

